

关于老年人生活所必需的护理用具

八乐梦 | as human, for human
PARAMOUNT BED



关注微信公众号 关注京东官方旗舰店



八乐梦床业(中国)有限公司
养老居家事业本部
陆勤

八乐梦床业集团 初创于1947年，是全球知名的医用床生产商。八乐梦产品是紧密贴合亚洲人体形的医用病床、居家护理床。在全世界范围内，拥有6家工厂（包含中国无锡工厂），市场涉及到亚洲、北美洲、欧洲、南美洲、非洲和大洋洲，销往100多个国家和地区。
目前在日本医院用床、养老院用床、居家护理床等拥有较高的市场占有率。

73th

进入中国 **16** 年

目前中国设有 **6** 个办事处

服务超过 **约 1500** 家中国

医院及养老院客户

60 人的销售及维修团队

遍布中国全国



八乐梦床业（中国）有限公司



焊接车间



涂装生产线



涂装生产线




展示厅



组装车间

为身心机能低下并且无法顺利进行日常生活的老人、
和身心障碍者提供便利的日常生活而制造的道具
以及为这一类人的机能训练而制造的用具和辅助装具。

拓宽生活圈提高日常生活的品质


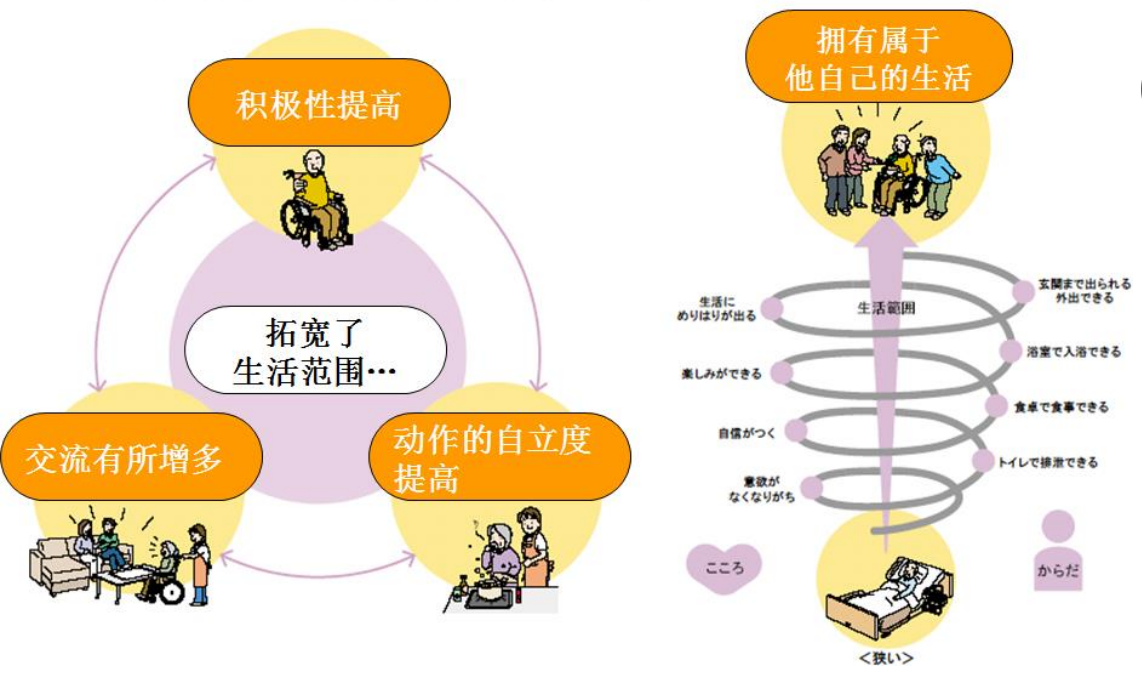


为进行的日常生活而制造的道具



①外表变化

身高·体重的减少（驼背）、
皮肤干燥、皱纹、色斑
牙齿脱落、头皮脱落、长白发

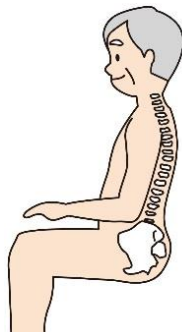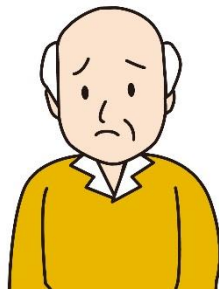

③感觉机能

视力、听力
外在感觉（触觉、痛觉、温度的低下）



②运动机能

动作迟缓并且不安稳、反射、反应的
低下。肌肉力量、持久力的低下、由
于骨量的减少。




④生理机能

脏器都会萎缩、机能低下。
消化机能 唾液等分泌量减少 咀嚼机能
心脏机能、呼吸机能、痰咳出力也会低下



「长卧不起」为何不好？

八乐梦 | as human, for human
PARAMOUNT BED

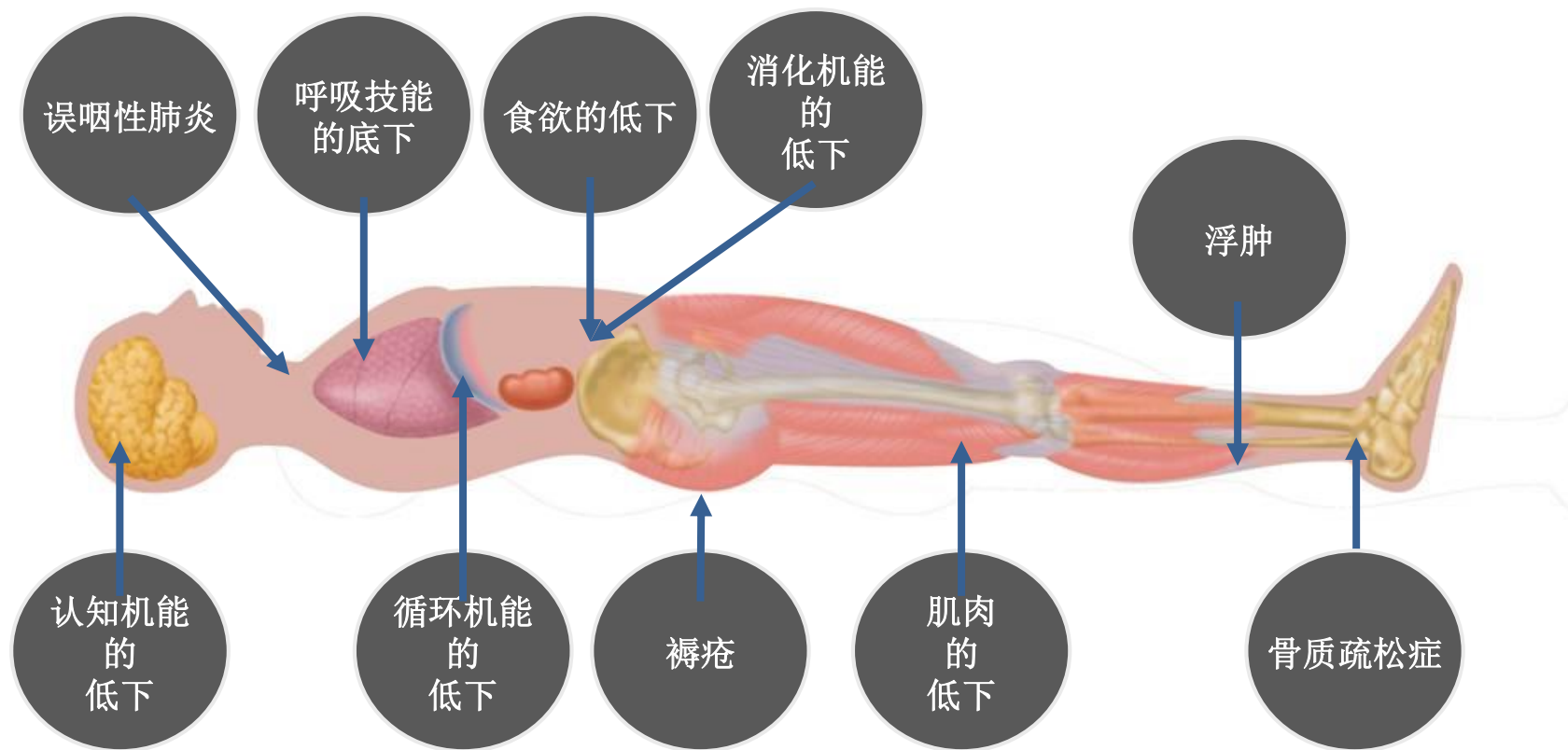

长卧不起 = 不抬起身体 = 所有的身体低能会显著低下

※不想起身，不想抬起身体，不能起身，都是有原因。

只有利用合适的护理床才有可能解决。

抬起身体之后做什么？

八乐梦 | as human, for human
PARAMOUNT BED



饮食
(咽下·胃造瘘)

离床的准备
(移乘·护理吊架)



呼吸
(居家氧气)

活动颈部、腕部
(聊天, 取物, 看外面)

排泄
(接尿器)



兴趣
(电视·手工艺·读书·记笔记)




清理口腔
拭擦
吸引
医疗作业

清醒



背部上升的功能

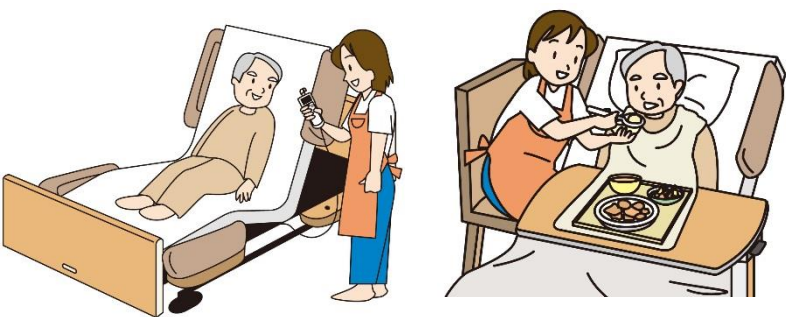

使用者

- 可以坐得很安稳。(静养·换衣服·看电视)
- 可以分散身体的压力，防止一直压迫在一处。
- 减少发生吸入性障碍以及呕吐。
- 可以顺畅地进行呼吸。
- 可以获得舒适的姿势。

护理者

- 可以减轻辅助起床护理时产生的身体负担。
- 可以减轻换尿布等护理时带来的身体负担。
- 可以安全的将老人移乘到轮椅上。



抬升到适合起身的角度，靠自己的力量也能起身

膝部上升的功能



使用者

- 可以缓和腹部的疼痛和紧张感。
- 当发生贫血和休克时，可以促进（重力引起的）上半身的血液循环。
- 可以预防膝关节的僵硬。
- 可以分散身体的压力，防止一直压迫在一处。
- 可以减缓脚部浮肿。

护理者

- 抬背时的下滑错位减少，并且可以减少帮助利用者向上移的次数。
- 可以辅助下肢的牵引。

骨盆无法竖立产生的风险

八乐梦 | as human, for human
PARAMOUNT BED

骨盆横卧的上升背部



骨盆竖立的上身背部



腰椎骨·尾骨顶到床垫、
于是会发生压迫和下滑错位。



床高度的调节功能



使用者

- 可以将高度调整到能安稳的坐在床边。
- 可以将高度调整到便于起身。
- 可以减轻滚落时带来的冲击。（降低高度）
- 换乘到轮椅时，可以配合轮椅与床面的高度从而顺利换乘。

护理者

- 可以减轻体位变换时对腰和膝盖的负担。
- 可以减轻更换尿不湿等护理时带来的身体负担。
- 便于更换床单和清扫。
- 可以配合轮椅与床面的高度，从而顺利换乘。




从端坐位的位置高度提高数厘米的话，可以减少站立时的负担。


【低床的好处】



- 即使身高矮小者，也可以完全将脚后跟着地。
- 即使不小心翻下床，低床位也可以有效减小坠床冲击。

- 轮椅可以更近距离靠近床边，让老年人能更方便换乘轮椅，也降低了老年人在换乘时摔倒风险。

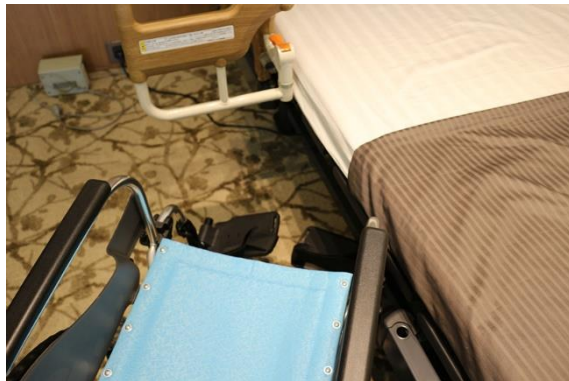

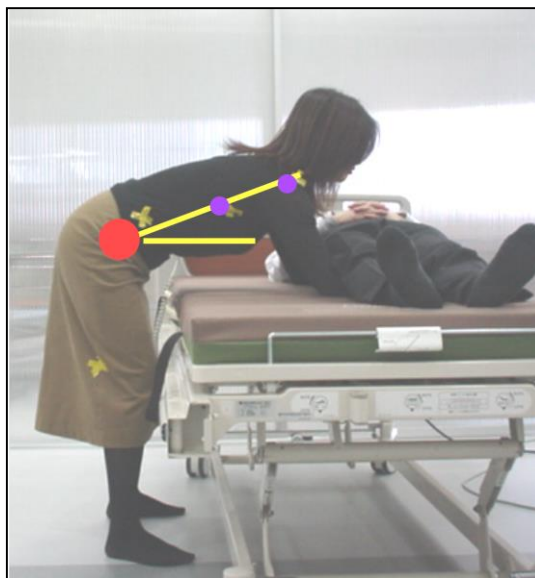

在关节处作上记号、进行看护。

然后用摄影机录下这一连串的动作。

用线将记号的活动连起来，然后计算对腰产生的负担。



- 整床的高度调节，可适应不同高度的护理人员，以更轻松的姿势进行护理。

- 同时也能有效缓解护理人员的腰部损伤。

しっかり端座位
Sittan
端座位保持テーブル



患者的背部不靠在靠背上



脚可以完全着地



自己控制自己的脖子





Step 1



Step 2



Step 3



易调节

每个用户都可以自身需求，调节合适的高度。




易操作


桌面部分可作为支撑平台和手肘部分的支撑，让患者可以在步行训练时，感觉轻松舒适。扶手，符合人体工程学的设计，适用于各种手握方式。操作方便。



香蕉体位转换器

八乐梦 | as human, for human
PARAMOUNT BED

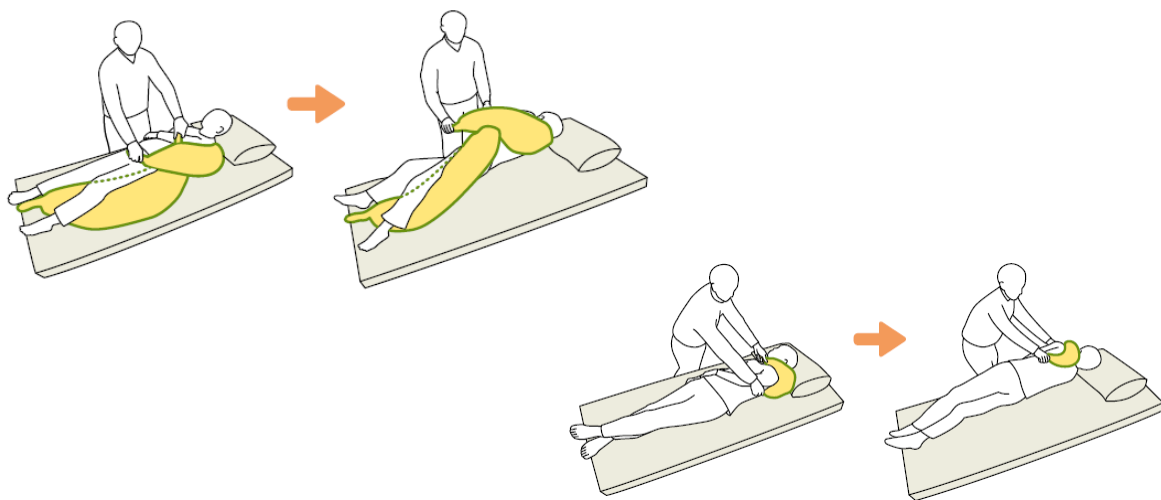

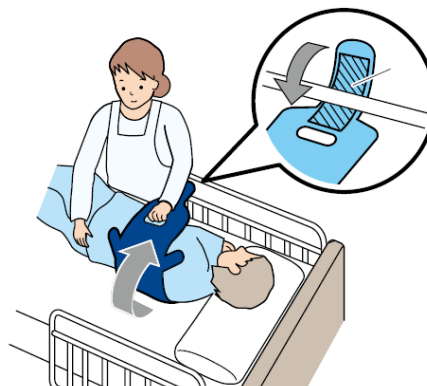

Paramount Bed 企业理念

用先进的技术与稳定的品质，创造舒适的护理环境。

THANK YOU

八乐梦床业(中国)有限公司



关注微信公众号



关注京东官方旗舰店